

Korrekte Befüllung der neuen Citrat- und NAF-Monovetten

Vor Kurzem haben wir die Monovetten für **Citrat** und **NAF** umgestellt. Die neuen Röhrchen haben einen größeren Durchmesser, damit sie auf unsere Geräte passen. Damit den Patienten mit den neuen Systemen nicht mehr Blut abgenommen wird als bisher, können diese Röhrchen **nur bis zur Hälfte** gefüllt werden. Dazu ist der Stempel verkürzt.

Wir möchten Sie bitten, die Monovetten nur **bis zu der entsprechenden Markierung** zu füllen (siehe Abbildung 1). Bei korrekter Handhabung ist eine Befüllung der Monovette über die Markierung hinaus **nicht möglich**. Ein Auffüllen der Monovette mit einer zweiten Probe ist **NICHT** empfohlen und kann zu falschen Ergebnissen führen. Ebenso sollte eine Unterfüllung der Monovette vermieden werden, da dies ebenfalls falsche Ergebnisse zur Folge haben könnte.



Abbildung 2: korrekt befüllte und beklebte Citrat-Monovetten (alt links, neu rechts).

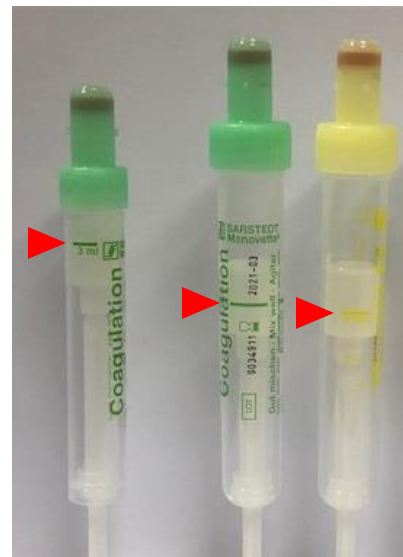


Abbildung 1: alte Citrat-Monovette links, neue Monovetten rechts (Citrat, NAF), Füllstand-Markierung siehe roter Pfeil.

Des Weiteren möchten wir Sie bitten nach wie vor auf die Position der Barcode-Etiketten zu achten. Diese sollten auch bei den neuen Systemen knapp unterhalb des Deckels angebracht werden (siehe Abbildung 2).

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung.